


Carbon Tech

Technologie Révolutionnaire
au Service du Bien-Être Animal

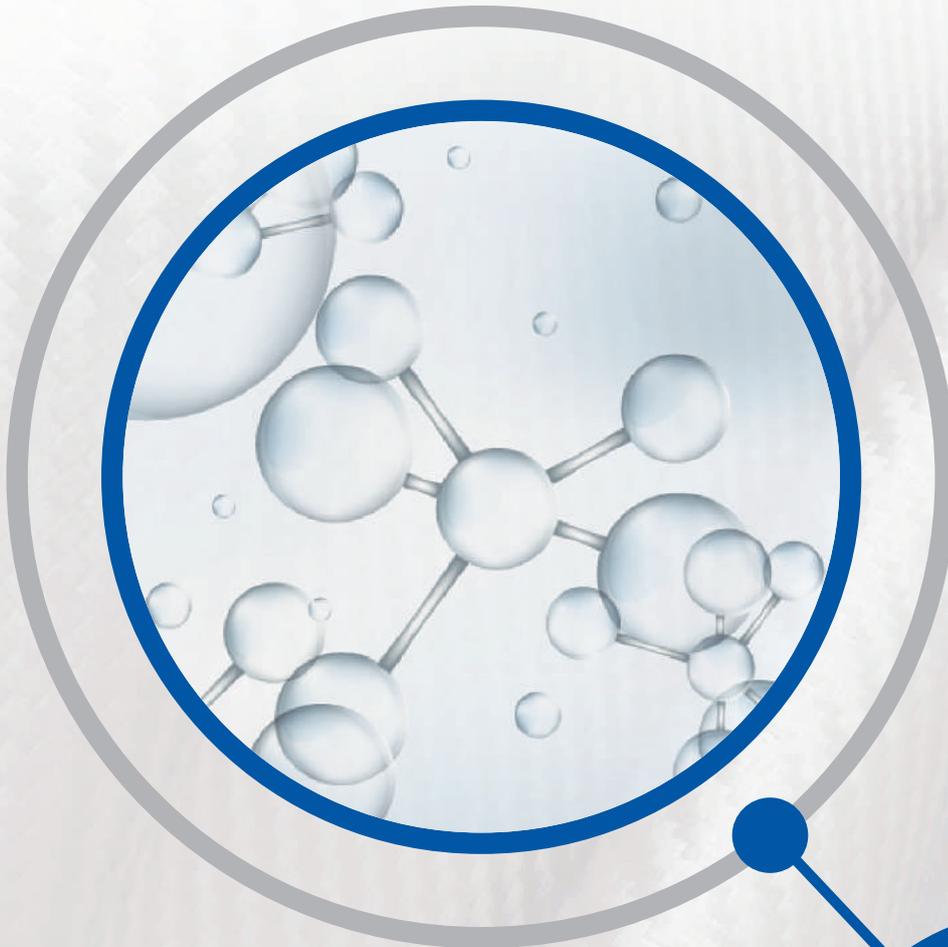

Carbon Tech



**Pourquoi utiliser
un matelas chauffant
vétérinaire ?**



En préventif :

Le maintien de la température corporelle est essentiel, aussi bien lors d'une anesthésie qu'en réanimation.

La température des patients baisse chez tous les patients sans exception lors d'une anesthésie.

Conséquences possibles d'un refroidissement :

- Réveil difficile
- Risque de choc
- Risque d'insuffisance rénale ou de problèmes cardiaques
- Dans certains cas, mort du patient

Ceci se vérifie lors de toutes les interventions, y compris les interventions dites bénignes telles qu'un détartrage.

Plus l'animal est petit, plus le risque d'hypothermie est élevé. Les NAC sont particulièrement concernés.

En curatif :

L'hypothermie consécutive à un choc ou à une anesthésie est à traiter systématiquement. En phase de réanimation, il est important de maintenir la température corporelle aussi proche que possible des 38°C. Le matelas chauffant Carbon Tech réchauffe le patient en douceur, sans danger et sans risque de brûlure.

L'utilisation du matelas Carbon Tech et le contrôle régulier de la température du patient lors d'une anesthésie et durant la réanimation sont des gestes simples mais indispensables.



2 modèles au choix :

Modèle cage :

52 x 62 cm (+/- 1 cm)

Puissance : 25W

Modèle table :

52 x 112 cm (+/- 1 cm)

Puissance : 50W

Tension utile 24V continue
avec alimentation
électronique universelle
de 100 à 240V

Carbon Tech



100% Efficacité, 100% Sécurité !

Haute technologie pour une efficacité maximale

Carbon Tech intègre un tissu carbone haute densité, spécialement conçu pour diffuser la chaleur de façon homogène.

Sa structure souple épouse parfaitement la forme de l'animal et lui apporte ainsi un maximum de confort.



Simple d'utilisation

Une fois branché, Carbon Tech atteint sa température de régulation en moins de 5 minutes.

Carbon Tech est conçu pour maintenir la température nécessaire au réchauffement de l'animal durant de longues périodes.

Chauffe en toute sécurité

D'une densité d'éléments chauffants six fois plus importante que les matelas classiques, Carbon Tech délivre une température de contact basse tout en apportant à l'animal l'énergie nécessaire à son réchauffement.

Extra plat, le tissu carbone de Carbon Tech ne stocke pas de chaleur, évitant ainsi tout risque de brûlure.



Robuste

Le revêtement de Carbon Tech est conçu pour résister aux griffures et aux morsures et garantit une parfaite étanchéité.

Hygiénique

Carbon Tech se nettoie simplement à l'eau et au savon. Après séchage, il se désinfecte facilement à l'alcool.

**Mano
Médical**
Medical equipment for veterinarians

15, rue du Noroit - 22100 Taden - France

Tel. +33 (0)2 96 85 86 76

welcome@manomedical.com

www.manomedical.com

 www.facebook.com/manomedical

 www.linkedin.com/company/manomedical

Carbon Tech



REVÊTEMENT
GARANTI
5 ANS
contre
les griffures
et les morsures

